

- Po opróżnieniu worka, przekręć nakrętkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara w celu przywrócenia pierwotnej pozycji.


5. Wykorzystanie łącznika

- Połącz worek urostomijny z workiem do zbiórki moczu, poprzez delikatne zaciśnięcie i spięcie końcówki worka urostomijnego z łącznikiem (F). Otwórz zawór poprzez przekręcenie nakrętki o pół obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, umożliwiając w ten sposób swobodny przepływ moczu do worka do zbiórki moczu. Konstrukcja łącznika umożliwia swobodne okręcanie się worka do zbiórki moczu, zapobiegając jednocześnie skręcaniu się drenu.
- W celu rozłączenia worka urostomijnego z workiem do zbiórki moczu, zamknij zawór, poprzez przekręcenie nakrętki

o pół obrotu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Chwyć łącznik za boczne uchwyty i delikatnie pociągnij (G). Istnieje możliwość połączenia worków urostomijnych Flexima ze standardowymi workami do zbiórki moczu.

UWAGA:

- Zwróć uwagę, aby delikatnie zgnieść/ wymiąć worek podczas zakładania w celu oddzielenia ścianek co umożliwi swobodny przepływ moczu.
- Po całkowitym opróżnieniu worka, zwróć uwagę, aby dokładnie zamknąć ujście poprzez dopasowanie do podstawy.
- Aby użyć pasa mocującego (wersja convex) wybierz dwa wycięcia, które leżą naprzeciw siebie (H, I)

Dystrybutor:  **Pofam - Poznań**
60-573 POZNAŃ, ul. Lindego 6
tel. 61 841-16-12; infolinia 801 30 55 77
www.pofam.poznan.pl




Produkt należy przechowywać w miejscu nienasłonecznionym i suchym.

Instrukcja użycia sprzętu stomijnego 1-częściowego



B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Flexima® Uro

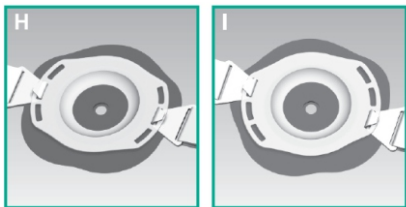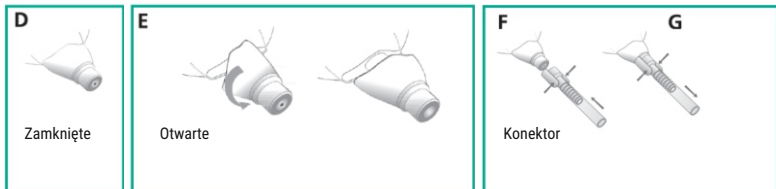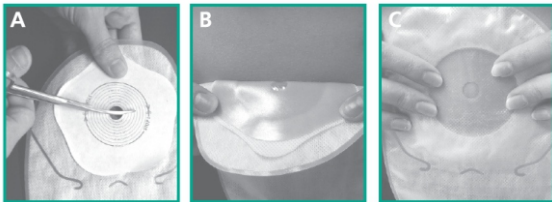

Instrukcja użycia

Jednocześnie worek urostomijny przeznaczony jest do zbierania moczu, u pacjentów po przeprowadzonym zabiegu wyłonienia przetoki na układzie moczowym.

Rodzaje worków:

- Flexima® Uro Silk: przyklepic chroniący skórę płaski lub wklęsły.

1. Przygotowanie skóry

- Dokładnie umyj ręce.
- Delikatnie umyj skórę wokół stomii ciepłą wodą i ostrożnie osusz przy pomocy ręcznika.
- Nie stosuj antyseptyków ani dezodorantów, które mogą podrażniać skórę i zmniejszyć właściwości przylepne worka.

2. Zakładanie worka

- Po uprzednim zmierzeniu, wytnij w przylepcu otwór odpowiedni do rozmiaru i kształtu Twojej stomii (A) (nie tnij poza skalą), uważając by nie uszkodzić folii worka. Worek urostomijny dostarczany jest z zakreconą nakrętką w pozycji zamkniętej, gotowy do użycia (D).
- Włóż palec do otworu i oddziel wewnętrzne ścianki worka, by umożliwić

dostanie się powietrza

- Zdejmij ochronny papier z przylepca.
- Zegnij płytkę w połowie (B) i umieść ją tak, aby stomia znalazła się wewnątrz otworu w płytce.
- Przyciśnij delikatnie dolną część płytki do skóry, następnie przyłóż do skóry część górną i także przyciśnij.
- Delikatnie, od dołu ku górze, wygładź wewnętrzną część przylepca aby zapewnić jak najlepsze przyleganie do skóry (C).

3. Zdejmowanie worka

- Delikatnie pociągnij za języczek przy płytce i zdejmij worek zaczynając od góry ku dołowi jednocześnie drugą ręką delikatnie uciskając na skórę wokół stomii.

4. Opróżnianie worka urostomijnego

- Skieruj wylot worka urostomijnego w kierunku toalety.
- Delikatnie przekręć nakrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do chwili uzyskania pożądanego strumienia (E).