

INSTRUKCJA UŻYCIA

1. OPIS PRODUKTU

Askina® Barrier Film to sterylny opatrunek w płynie, który tworzy przezroczystą powłokę ochronną po zaaplikowaniu na skórę. Opatrunek ten jest bezbarwny, przezroczysty i posiada dobrą przepuszczalność dla wilgoci i tlenu. Askina® Barrier Film nie zawiera alkoholu, nie powoduje uczucia pieczenia i dyskomfortu na skórze.

2. WSKAZANIA

Askina® Barrier Film jest zalecany do stosowania na skórę zdrową lub uszkodzoną. działa jako bariera ochronna:

- chroniąc przed podrażnieniami od płynów ustrojowych,
- w celu zabezpieczenia skóry wrażliwej i delikatnej,
- pod przyłepce i opatrunki w celu zmniejszenia zakłóceń gojenia się tkanek,
- do uszkodzonej skóry,
- na otarcia skóry,
- w celu ochrony obszaru skóry wokół rany lub wokół stomii,
- przy małych rozcięciach i rankach skóry,
- w celu zabezpieczenia miejsc mocowania drenów i cewników zewnętrznych.

3. PRZECIWSKAZANIA/ INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie należy stosować, jeśli skóra wokół owrzodzenia/ odleżyny jest zainfekowana w wyniku choroby zakaźnej, syfilisu, głębokiego zakażenia grzybiczego oraz przy poparzeniach trzeciego stopnia.

- Jeżeli objawy infekcji (temperatura, obrzęk, zaczerwienienie) postępują lub stan skóry pogarsza się niespodziewanie, należy skontaktować się z lekarzem.
- Askina® Barrier Film polecany jest do ran bez specyficznych powikłań.
- Askina® Barrier Film nie powinien być stosowany na zainfekowaną skórę.
- Nie należy używać gdy opakowanie jest uszkodzone.
- Askina® Barrier Film w postaci płynnej jest substancją łatwopalną. Zaleca się stosować preparat w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od źródeł ognia i źródeł zaplonu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Użycie innych środków ochronnych takich jak kremy, maści czy balsamy może zmniejszyć efektywność działania Askina® Barrier Film.

4. INFORMACJE DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Askina® Barrier Film jest prosty w aplikacji i nie wymaga żadnych dodatkowych umiejętności czy sprzętu. Ponowne zastosowanie zależy od częstotliwości i konieczności oczyszczenia skóry oraz od zmiany worków stomijnych czy opatrunków. Często oczyszczana skóra, wymaga codziennej ponownej aplikacji środka, natomiast przy mniejszej częstotliwości oczyszczania, preparat można stosować co 2-3 dni.

4.1. PRZYGOTOWANIE SKÓRY

- Oczyszczyć skórę sterylnym roztworem soli fizjologicznej (0,9%) lub odpowiednim środkiem do oczyszczania ran takim jak Prontosan® i jałowym wacikiem.
- Osuszyć skórę przed nałożeniem Askina® Barrier Film.

4.2. NAKŁADANIE ŚRODKA

- Zdjąć wieczko. Trzymając spray w odległości 10-15 cm od skóry, nacisnąć końcówkę aplikatora i rozpylić środek nad powierzchnią skóry, którą chcemy zabezpieczyć pozostawiając na niej gładką powłokę ochronną. Pozostawić do wyschnięcia na 30 sekund.
- Powtórzyć aplikację ponownie na te miejsca skóry, które zostały ominięte podczas pierwszego zastosowania preparatu.
- Jeśli Askina® Barrier Film jest stosowany na obszar skóry z fałdami lub na miejsce gdzie skóra styka się ze skórą, należy delikatnie wygładzić i rozprostować nierówności skóry przed nałożeniem środka, przytrzymać rozprostowane powłoki do wyschnięcia ochronnej warstwy i dopiero wtedy pozwolić ciału wrócić do poprzedniego ułożenia.
- Nałożyć wieczko na aplikator, gdy nie jest używany.

Usuwanie / zmiana warstwy ochronnej

- Askina® Barrier Film może zostać usunięta za pomocą większości medycznych środków myjących.
- W celu nałożenia kolejnej nowej warstwy ochronnej Askina® Barrier Film, należy postępować zgodnie z instrukcją.

5. DOSTĘPNOŚĆ

- Askina® Barrier Film jest dostępna w postaci butelki z atomizerem o pojemności 28 ml.