

INSTRUKCJA UŻYCIA

1. WSKAZANIA

Zmywacz B.Braun Adhesive Remover został opracowany aby zmniejszyć ból i ułatwić usuwanie z powierzchni skóry pozostałości po produktach do pielęgnacji stomii, opatrunkach i innych środkach medycznych stosowanych do pielęgnacji skóry. Silikonowa formuła nie powoduje pieczenia i jest łagodna dla skóry. Wygodne opakowanie ułatwia dozowanie odpowiedniej ilości środka, zapewniając optymalną wydajność.

Formuła bezzapachowa.

Nie zawiera chlorofluorowęglowodorów.

2. SPOSÓB UŻYCIA

Należy postępować z godnie z instrukcjami

- Powoli obrócić zakrętkę o dwa kliknięcia, aby otworzyć otwór do rozpylania. Widoczna będzie czarna dysza do rozpylania.



- Rozpylić środek B.Braun Adhesive Remover wokół krawędzi opatrunku, przylepca lub powierzchni z której trudno usunąć pozostałości po kleju, a następnie odczekać kilka sekund.
- Delikatnie oderwać przylepiec od skóry. W razie potrzeby rozpylić dodatkową dawkę zmywacza B.Braun w celu łatwiejszego

usunięcia kleju.

- Zmywacz B.Braun Adhesive remover wysycha w ciągu kilku sekund.
- Po wyschnięciu nie utrudnia zakładania kolejnych przylepców czy opatrunków.
- Data przydatności do użycia i numer serii znajduje się na dolnej ścianie opakowania.

3. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Pojemnik zawiera gaz sprężony.

Chronić przed działaniem promieni słonecznych i nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 50°C.

Nie przebijać ani nie wrzucać do ognia, nawet po zużyciu.

Nie rozpylać na otwarty płomień ani żarzący się materiał.

Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Nie rozpylać w okolicach oczu, na twarz ani na przerwana oraz podrażnioną skórę.

W przypadku wystąpienia podrażnień natychmiast zaprzestać stosowania.

Zakaz palenia podczas stosowania środka.

Unikać wdychania oparów środka.

Stosowanie środka niezgodne z przeznaczeniem może spowodować śmierć.

4. UWAGA ! Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

Unikać kontaktu z podrażnioną skórą lub wrażliwymi miejscami.

W razie wystąpienia podrażnień natychmiast zaprzestać stosowania.

5. SKŁADNIKI

Siloksany, węglowodorowe środki spieniające.

Przechowywać w miejscu nienasłonecznionym.

Przechowywać w temp. poniżej 50°C.

Produkt łatwopalny.

Podlega przetworzeniu.

Nie używać gdy opakowanie jest uszkodzone.

Przed zastosowaniem zapoznać się z instrukcją użycia.