

## **INSTRUKCJA UŻYCIA**

### **SUPERFILLER**

#### **pasta uszczelniająco gojąca**

##### **1. OPIS PRODUKTU**

Superfiller jest wygodną w użyciu oraz wydajną pastą uszczelniającą do kolostomii, ileostomii, urostomii oraz wszelkich innych przetok.

Pasta przeznaczona jest do wypełniania wszystkich nierówności i fałd brzusznych spowodowanych obrażeniami skóry.

##### **UWAGA!**

Tylko do użytku zewnętrznego.

Nie stosować na otwarte rany.

Zawiera alkohol. Może powodować pieczenie przy aplikacji.

Może powodować podrażnienia skóry.

W przypadku wystąpienia podrażnień skóry prosimy skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką stomijną.

##### **2. APLIKACJA**

Pastę Superfiller nakładamy wilgotną dłońią wokół stomii, tak by uszczelniła wszelkie nierówności i fałdy na skórze. Wytnij odpowiednią średnicę otworu w płytce stomijnej i umieść bezpośrednio na zaaplikowanej wcześniej paście stomijnej. Przyciśnij płytkę delikatnie upewniając się, że pasta uszczelniająca umiejscowiona jest pod płytką.

##### **3. USUWANIE**

Pasta jest łatwa do usunięcia po 48 godzinach od aplikacji. W przypadku usuwania pasty przed tym czasem, użyj ciepłej wody. Nie jest konieczne usuwanie całości zdejmowanej pasty przed kolejną aplikacją.

Pozostałości pasty pozostawione są w celu uniknięcia możliwych podrażnień skóry, nową warstwę natomiast nakładamy na warstwę pierwotną.

Po użyciu zamknij dokładnie tubkę.

##### **5. DOSTĘPNOŚĆ**

Pasta Superfiller dostępna jest w postaci tubki o pojemności 60g.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Unikać bezpośredniego nasłonecznienia.

##### **SKŁAD**

Zawiera ester butyloowo-PVM/MA.